


# Plantígrafo


**PODO***Tech*<sup>®</sup>

## O PRODUTO

Aparelho para obter a plantigrafia.

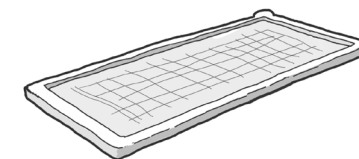

## MODO DE USAR

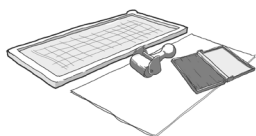


1 - Para realizar a plantigrafia, os seguintes itens são necessários: o plantígrafo, almofada de carimbo, papel sulfite e rolo de pintura.




2 - Tingir o rolo de pintura com tinta na almofada de carimbo.



3 - Passar o rolo banhado de tinta na superfície texturizada do plantígrafo.

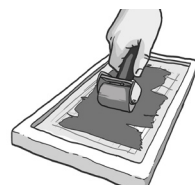

4 - Garantir que a tinta envolva toda a superfície pintando no sentido horizontal e vertical.

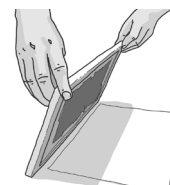

5 - Colocar o papel a ser carimbado em um plano liso e deitar o plantígrafo com a superfície pintada na face em contato com o papel.



6 - O paciente irá pisar com firmeza no centro do plantígrafo.



7 - Repita o processo para fazer os dois pés.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A HS Technology garante este produto pelo período de 1 (um) ano a contar da data de emissão da Nota Fiscal de venda. Estão excluídos da garantia os problemas gerados por acidentes mecânicos, mau uso ou forças da natureza.

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpar somente com pano umedecido com água e sabão neutro;
- Não utilizar álcool para limpeza.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensão: 380 x 195 x 16mm  
Peso do plantígrafo: 540 gramas  
Peso total: 1,15kg  
Composição: alumínio, acrílico, borracha e couro sintético.  
Acompanham o produto: rolete emborrachado, tinta e almofada para carimbo, bloco de plantigrafia.

## CONTATO

Rua Marcos Tomazini, 158.  
Portal de Versalhes I.  
86057-060 Londrina - PR - Brasil  
Telefone: +55(43)3327-7007  
E-mail: sac@hs.ind.br  
Whatsapp: [www.podotech.com.br/suporte](http://www.podotech.com.br/suporte)  
Site: [www.podotech.com.br/assistencia-tecnica](http://www.podotech.com.br/assistencia-tecnica)